


“ちょっと聴こえづらい” にちょうどいい

集音器
取扱説明書
保証書付
ANGV-MIS13-A

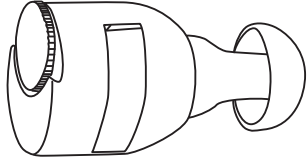

家庭用
区分：持込

もくじ

この度は、e angle 集音器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しいご使用をお願いいたします。また、この取扱説明書はいつでも見ることができる場所に保管してください。

安全上のご注意	1
本製品の取扱について	1
各部のなまえ	2
使用方法	2
ボタン電池の交換について	2
ハウリングについて	3
お手入れの仕方	3
故障かな?と思ったら	3
主な仕様	3
アフターサービス・ご相談窓口	4
保証書・無料修理規定	4

※ ご注意：本製品は補聴器のように医療機器の認証を受けた機器ではありません。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる方や、他の方への危害と損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

■ 警告、注意について

	警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生する事が想定される内容です。

■ 図記号の例

	禁止（してはいけない内容）を表示します。
	強制（実行しなくてはならない）内容を表示します。

本製品の取り扱いについて


警告	
	以下のような症状が現れたときは、ただちに本製品の使用を中止し、ただちに医師へご相談ください。 ・耳の痛みや耳鳴り、めまいを感じたとき。・耳だれが生じたり、皮膚のかぶれや湿疹ができたとき。 ・以前に比べて耳の聴こえが悪くなった場合。耳を傷める原因になります。
	本製品は乳幼児などの手の届かないところへ置いてください。 ・本製品やボタン電池を飲み込む恐れがあります。飲み込んだときは、ただちに医師へご相談ください。
	ご使用前に音量を最小にしてから装着してください。 ・突然大きな音が出て耳を傷める原因になります。
	分解、修理や改造を絶対にしないでください。発火、感電、けがの原因になります。
	本製品は防滴、防水仕様ではありません。水に浸したり水をかけたり濡れた手で使用しないでください。
注意	
	耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用しないでください。耳を傷める原因になります。
	ハウリング（“ピーピー” という音）がするときは使用しないでください。 ・そのままご使用になりますと耳を傷める原因になります。音量を下げてハウリングがなくなったことを確認してからお使いください。

	MRI（磁気共鳴画像診断装置）診断やCT スキャンなど電磁波を利用した装置を使用する治療を受けるときは、かならず本製品を外してください。また、携帯電話やPHSと一緒に使わないでください。故障の原因になります。
	本製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
	お手入れの際は、次の溶剤や洗剤を使用しないでください。 ベンジン、シンナー、液体洗剤、スプレー洗剤、アルコール入り洗剤、洗濯用洗剤、漂白剤、研磨剤、腐食剤、潤滑剤


ボタン電池の取り扱いについて

警告	
	ボタン電池をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しないでください。
	ボタン電池は乳幼児などの手が届かないところに保管してください。 ・誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。
	ボタン電池の液が漏れて、目に入らないように十分注意して下さい。 ・失明などの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談ください。
注意	
	ボタン電池は充電式ではありません。充電しないでください。
	必ず指定のボタン電池を使用してください。
	ボタン電池のプラス、マイナスを正しく入れてください。
	石油ヒーターやガスヒーターなどの暖房機器から発生する二酸化炭素により、電解液が劣化することがあります。電池寿命が短くなるので、火気を用いる暖房器具を使用する場合は換気を十分に行ってください。
	使用済みのボタン電池は、お住まいの市区町村の指示に従って廃棄してください。


各部のなまえ

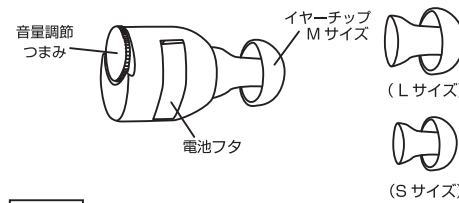

付属品

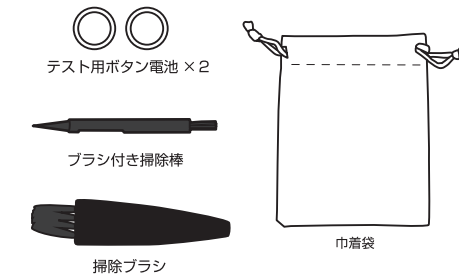

使用方法

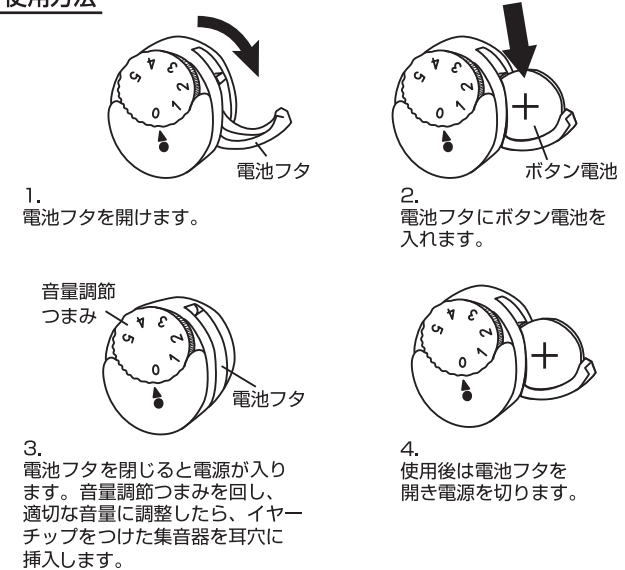

※ 電池フタが閉じていると電源が入り、電池フタが開いていると電源が切れます。
※ 本製品を使用してもよく聞き取れない音もあります。小さすぎる音、遠くの音や周囲の雑音大きい環境下での音声は十分に聞き取れないことがあります。
※ 低周波治療器・電磁（IH）調理器などによって本製品に雑音が発生することがあります。

ボタン電池の交換について


・ボタン電池が消耗すると聴こえにくくなりますので、新しいボタン電池に交換してください。
・必ず指定されたボタン電池を使用してください。（ボタン電池はPR48(13)を使用してください）
・付属品のボタン電池はテスト用です。動作時間を保証するものではありません。早めに新しいボタン電池に交換してください。
・長時間使用しないときは、ボタン電池をとりだしておいてください。

ハウリングについて


ハウリング（“ピーピー”という音）がするときは使用しないでください。そのままご使用になりますと、耳を傷める原因になります。音量を下げてください。

お手入れの仕方

電池フタを開けて電池を取り出します。

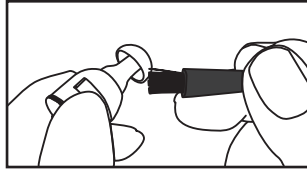

掃除ブラシでイヤホンキャップの外側の汚れを取り除きます。

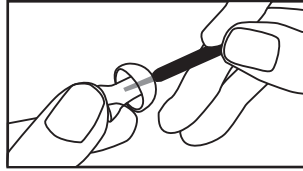

掃除棒でイヤホンキャップの内部に詰まった汚れを取り除きます。

故障かな？と思ったら

症状	原因
音が聴こえない	電源が入っていない
	音量が小さい
	イヤーチップが耳あかななどで汚れている
	ボタン電池の入れ方を間違えている
	ボタン電池が消耗している
	結露などでボタン電池が湿っている
	ホコリなどがボタン電池に付着している
	正しく耳に装着されていない
“ピーピー”という音（ハウリング）がする	イヤーチップが耳に合っていない
	音量が大きい
	手や電話などで耳をふさいでいる
	正しく耳に装着されていない
耳にきちんとはまらない	イヤーチップのサイズが合っていない
音が大きい	音量が適切でない

主な仕様

本体寸法	幅 13.0 × 高さ 16.5 × 奥行き 21.5 mm
質量	約 2.5 g（ボタン電池、イヤーチップを除く）
使用電池	ボタン電池 PR48(13 亜鉛電池) × 1 個
電池寿命	約 40 時間
最大音量	110 ± 5 dB
最大音量利得	30 dB
材質	本体：ABS、イヤーチップ：シリコン
付属品	テスト用ボタン電池 × 2、イヤーチップ × 3 掃除ブラシ × 1、掃除棒 × 1、巾着袋 × 1

アフターサービス・ご相談窓口

お取扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談ください
※お買い上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈与品など）は各窓口へお問い合わせください

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答およびお客様サービス向上のために利用させていただきます。
 ご質問の内容によりましては、適切な回答のためにエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。
 その他、ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

ご相談窓口 ～製品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客さま相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間：月曜日～金曜日 9:30～18:30（土日祝・年末年始除く）
 〒540-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル
 ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2025.7時点）

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

■家電の119番



0570-06-0119 (有料)

受付時間：月曜日～日曜日 9:00～19:00（年中無休）
 ※年末年始に関しては受付時間が変更になる場合がございます。
 ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2025.7時点）

修理を依頼されるときは

- 「故障かな？と思ったら」をご確認ください。それでも異常があるときは使用を中止してください。
- 製品と保証書・お買い上げシートを準備し、家電の119番、または販売店にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
 技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
 部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
 《保証期間中》
 保証書の内容に従って修理いたします。
 《保証期間が過ぎている場合》
 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
 ※ 場合によっては修理できない場合もございます。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。
 ※ 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。