


# 取扱説明書（添付文書）

## ハンズフリーマッサージャー 保証書付（裏表紙）

# ANGV-MSHF15-A

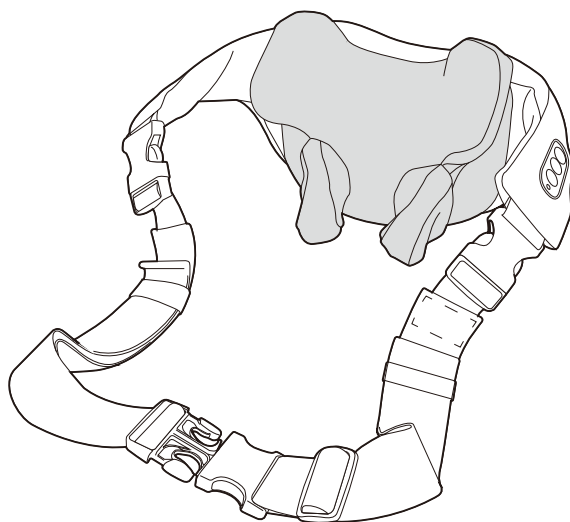

この度は、ハンズフリーマッサージャーを  
 お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、  
 正しいご使用をお願いいたします。  
 また、この取扱説明書はいつでも見る事ができる所に  
 保管して下さい。

・この製品は日本国内用に設計されていますので、  
 日本国外では使用できません。  
 FOR USE IN JAPAN ONLY



## もくじ

安全にお使いいただくために	1
使用目的または効果	4
各部のなまえとはたらき	5
ご使用のまえに	6
使いかた	8
着脱カバーの取り外し・取り付け	12
お手入れについて	13
使用しないときは	13
製品を廃棄するとき	14
故障かな？と思ったら	16
仕様	17
アフターサービス	18
保証書	裏表紙

## 安全にお使いいただくために

ご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を示しています。

 <b>警告</b>	死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。	 <b>注意</b>	傷害や損害を負うまたは物的損害※が発生する可能性が想定される内容です。
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

※物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を示します。

●お守りいただく内容を図記号で示しています。

 禁止を示す記号	 強制・指示を示す記号
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

## 使用者の体調に関する注意

### 警告

次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人。  
例：血栓[塞(そく)栓]症・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。  
事故やけがのおそれがあります。

幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。  
けがや故障のおそれがあります。

首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。  
また頭部・首前方・胸部・腹部・骨部(ひじ・ひざ)はマッサージしない。  
そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る



必ず守る

下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人。
  - 悪性腫瘍のある人。
  - 心臓に障害のある人。
  - 温度感覚喪失が認められる人。
  - 妊娠中の人、または出産直後の人。
  - 糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人。
  - 治療部位に創傷のある人。
  - 安静を必要とする人。
  - 体温38℃以上(有熱期)の人。
  - 例：急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき。
  - 骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉ばなれなど急性[疼(とう)痛性]疾患の人。
  - 背骨に異常がある人または背骨が左右に曲がっている人。
  - 腱鞘(けんしょう)炎の人。
  - その他、医療機関で治療中の人。
  - 上記以外に身体に特に異常を感じている人。
- 事故や体調不良をおこすおそれがあります。

### 注意

使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。  
そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る



必ず守る

製品の使用時間は1回15分以内にする。  
また同一箇所への連続使用をさけ、一日の使用は30分以内をめどに使用する。  
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

使い始めは、もみ玉を身体に軽く押し当て弱い刺激でマッサージすること。  
けがや体調不良をおこすおそれがあります。

他の治療器と同時に使用しない。  
事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

食後および飲酒後は使用しない。  
体調不良をおこすおそれがあります。

眠りながら使用しない。  
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

本体の表面が熱くなるため熱や痛みに敏感でない人はヒーター機能を使用しない。  
低温やけどのおそれがあります。



禁止

身体を本体に強く押し付けて使用しない。  
皮膚や筋肉を傷める原因になります。

肌の弱い人は素肌で使用しない。  
摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

## 使用に関する注意

### 警告

本体布カバー・着脱カバーが破れていないか確認し、破れたり、はずした状態では使用しない。破れている場合は、どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に修理を依頼する。事故や故障、けがの原因になります。

電源は交流 (AC) 100Vを使用する。  
また付属のUSBケーブル以外は使用しない。  
守らないと、火災やショートの原因になります。



必ず守る

USBケーブルのコネクタやACアダプターは根元まで正しく確実に差し込む。  
また、たこ足配線はしない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグのホコリなどは定期的にとる。  
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

ACアダプターをコンセントから抜くとき、USBケーブルを本体から抜くときは、ケーブルを持たずに、必ずACアダプター本体、USBのコネクタ部を持って引き抜く。  
ケーブルを持って引き抜くと、ケーブルが破損し、火災や感電の原因になります。



電源プラグを抜く

他製品に付属のUSBケーブルを使用しない。  
故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

ぬれた手でプラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止

身体がぬれた状態では絶対に使用しない。  
感電や故障のおそれがあります。

USBケーブルの取り扱いについて、下記のことにご注意すること。

- ・傷つけたり破損させない。また加工しない。
  - ・無理に曲げたり、引っ張らない。またねじらない。
  - ・充電中に束ねたり、本体に巻き付けない。
  - ・重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
  - ・USBコネクタ挿入口や、ACアダプターへのUSBコネクタの差し込みがゆるいときは使用しない。
  - ・リード線を傷つけない。
  - ・コネクタを金属でショート（短絡）させない。
  - ・ねじれをほどこいて保管する。
- 火災や感電の原因になります。



必ず守る

リチウムイオン電池の誤った取り扱いをしない。

- ・製品以外に使用しない。
  - ・火への投入、加熱をしない。
  - ・火のそばや炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置をしない。
  - ・分解・改造をしたり、釘で刺す・衝撃を与えるなどリチウムイオン電池に負荷をかけない。
  - ・水につけたり、かけたりしない。
  - ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
  - ・ぬれた手でリチウムイオン電池をさわらない。
- 破裂・液漏れ・発熱・発火・ショート・感電などの原因になります。



禁止

リチウムイオン電池が液漏れして、眼に入ったときは、眼をこすらず、直ちにきれいな水で洗う。

失明の原因になります。直ちに医師の治療を受けてください。



必ず守る

リチウムイオン電池が液漏れして、手や身体、服に付いたときは、直ちにきれいな水で十分に洗い流す。

皮膚の炎症やけがの原因になります。

# 使用に関する注意

## ⚠ 警告



分解禁止

改造はしない。  
また、修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理をしない。  
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。



禁止

施療部位にアクセサリや、マフラーなどをつけた状態で使用しない。  
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。  
本体の上に寝た状態で使用しない。  
本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

## ⚠ 注意



必ず守る

使用する前に必ず各種ボタン、タイマーなどが正常にかつ安全に作動するか確認する。  
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

本体が動かなくなったり、異常を感じた場合は使用を中止し、ただちにスタート/ストップボタンを押して電源を切る。充電している場合はUSBケーブルを抜く。  
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お客様自身で勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



電源プラグを抜く

充電中に雷、地震、停電になった場合はただちに本体からUSBケーブルを抜く。  
停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

本体およびもみ玉に無理な力をかけたり、上に立ったり、座ったりまたは踏み台にしたりしない。  
けがや故障の原因になります。



禁止

本体や操作部に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。  
火災・感電・故障の原因になります。  
また誤作動の原因になります。

製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。また、使用目的(P.4参照)以外の目的で使用しない。  
事故やけがの原因になります。



電源プラグを抜く

充電時以外は、必ずUSBケーブルを本体から抜く。  
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



禁止

本体布カバー・着脱カバーを無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。  
けがや故障の原因になります。

操作ボタンを2つ以上同時に押さない。  
故障の原因になります。

USBコネクタ挿入口に金属類などを差し込まない。  
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。



水ぬれ禁止

製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。  
感電や故障の原因になります。

## ⚠ 注意

連続使用などにより、リチウムイオン電池の温度が上昇している場合、安全装置が働き操作部ランプが赤点滅し、充電を開始しないことがあります。異常ではありません。  
充電電池の温度が下がれば充電できますので、5時間以上(使用環境により異なります)放置し、充電を再開してください。

## 使用場所についての注意

### ⚠ 注意



必ず守る

製品は椅子やソファなど安定した場所で使用する。

不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。



禁止

直射日光の当たるところでは使用しない。  
変形・変色・変質のおそれがあります。



水場使用  
禁止

お風呂場などの水のかかりやすい場所や  
湿気の多い場所での使用・保管はしない。  
感電・故障のおそれがあります。



禁止

布団の中や毛布などをかぶせて使用しない。  
本体内部の温度が高くなり、火災や故障の原因  
になります。



禁止

可燃物やストーブなど火気の近くで使用  
したり、こたつの中で使用しない。

またたばこを吸いながら使用しない。  
火災や事故、低温やけどの原因になります。

## お手入れについての注意

### ⚠ 注意



電源プラグ  
を抜く

お手入れの際は、必ず電源を切り、USBケー  
ブルを抜いた状態で行う。

守らないと、感電やけがのおそれがあります。



必ず守る

しばらく使用しなかったときは、製品が正  
常にかつ安全に作動することを確認してか  
ら使用する。

確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

長期間使用しない場合は、3か月に1回は  
充電をする。

完全放電すると充電できなくなる場合があ  
ります。



禁止

ベンジン・シンナー・アルコール・  
アルカリ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、  
殺虫剤などをかけない。

変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感電・  
引火のおそれがあります。

## 使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす

## 各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。

\*の付いた部品・付属品は、お買い上げ販売店にお問い合わせ頂き、ご購入していただけます。


製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文下さい。

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

### 購入対応部品

着脱カバー／ベルト／専用 USB ケーブル(付属品)


### 本 体

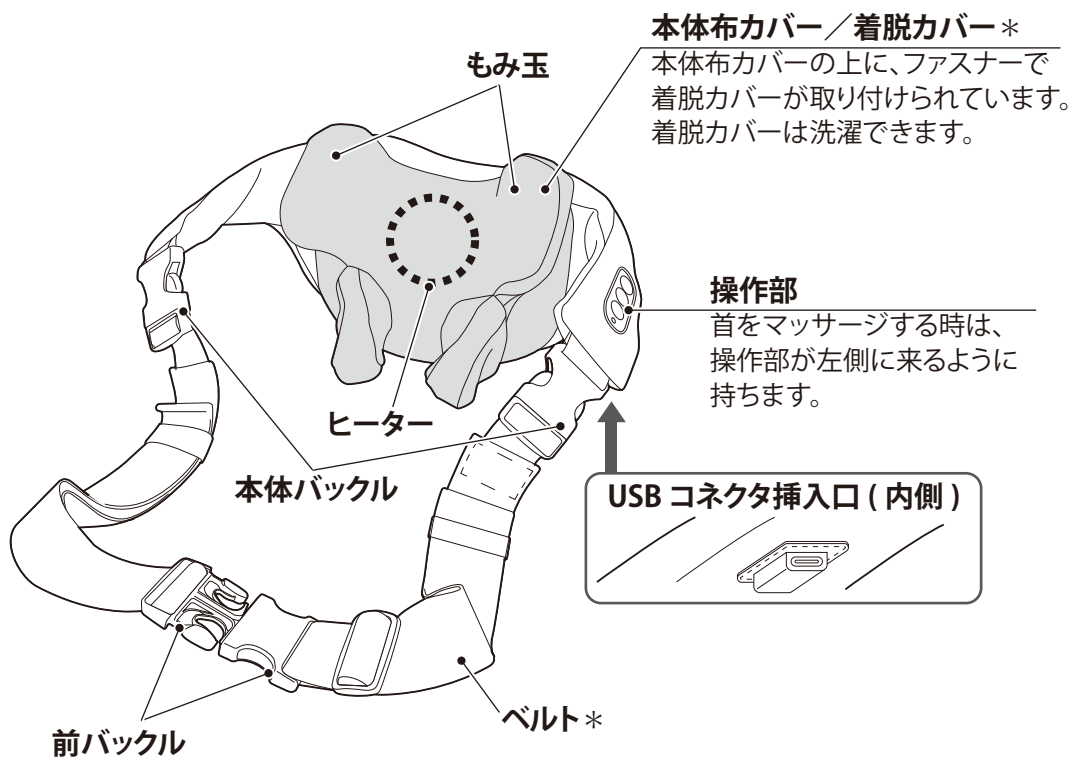

### 付属品

#### 専用 USB ケーブル\*

USB タイプ A - タイプ C

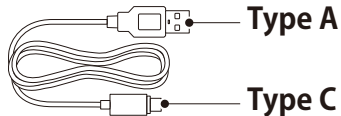

警告

付属の USB ケーブル以外使用しない。



## 各部のなまえとはたらき

### 操作部

#### 正転／逆転ボタン

スタート／ストップボタンを押した後、ボタンを押すと、もみ玉が一定の速度で「正転」動作または「逆転」動作します。



円柱 2 段形状

#### スタート／ストップボタン

ボタンを押すと、自動コースが開始します。  
もう一度押すと、すべての動作が停止します。



ドーム形状



#### ヒーターボタン

ヒーターの ON/OFF を切り替えます。  
ランプが赤く点灯します。

※ヒーターのみの使用はできません。



円柱形状

#### ランプ

ヒーター使用時は赤く点灯します。  
電池残量が少なくなると、赤と緑のランプが交互に点滅し、その後動作が停止します。  
充電中は緑色で「点滅」し、満充電になると「点灯」します。

### ⚠ 注意

連続使用などにより、リチウムイオン電池の温度が上昇している場合、安全装置が働き操作部ランプが赤点滅し、充電を開始しないことがあります。異常ではありません。充電の温度が下がれば充電できますので、5 時間以上（使用環境により異なります）放置し、充電を再開してください。

## ご使用のまえに

初めてご使用になる時や、長期間ご使用にならなかった時は、電池残量が無くなって、作動しないことがあります。充電してからご使用ください。

また定期的（3 か月に 1 回）に充電を行ってください。

電池残量が少ない場合は、動作中操作部のランプが赤と緑に交互に点滅し、その後動作が停止します。動作停止後に、充電を行ってください。

**約 6 時間の充電で 1～2 時間使用できます。**

※使用する環境、回数によって使用時間は異なります。

※高い周囲温度の中で充電を行うと保護装置が働き、充電が途中で止まる場合があります。

## ご使用のまえに


- 製品に AC アダプターは付属していませんので、市販の USB 対応 AC アダプターをご用意ください。また市販の USB 対応 AC アダプターは必ず、以下のものを使用してください。

### 推奨仕様：定格出力 DC5V/2.0-2.5A の AC アダプター

- 製品に付属している USB ケーブルを使用してください。
- パソコンを使用しての充電はしないでください。
- AC アダプターに損傷がないか確認し、異常がある AC アダプターは使用しないでください。またお使いになる AC アダプターの取扱説明書も合わせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 急速充電ができる PD(Power Delivery) や QC (Quick Charge) 対応の AC アダプターは使用しないでください。故障するおそれがあります。
- 取り扱いを誤ったために生じた故障などについては当社では責任を負いかねます。


- 1 本体の USB コネクタ挿入口に付属の USB ケーブル (Type-C 側) のコネクタを差し込む  
容易に着脱しないように、正しく確実にしっかり奥まで差し込んでください。

- 2 付属の USB ケーブル (Type-A 側) のコネクタを AC アダプターの USB ポートに差し込む  
容易に着脱しないように、正しく確実にしっかり奥まで差し込んでください。

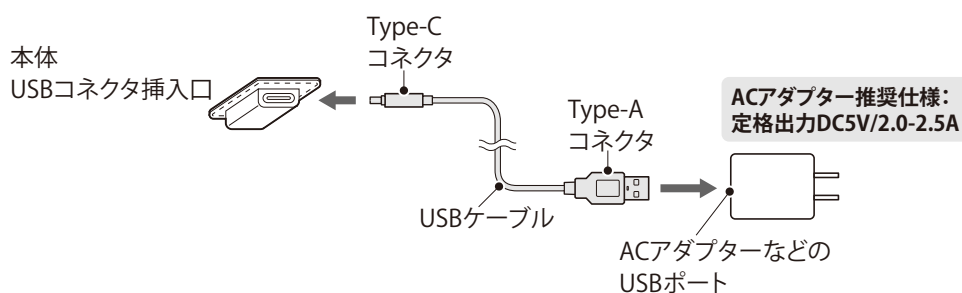

- 3 AC アダプターをコンセントに差し込む  
しっかり奥まで差し込んでください。

充電が開始され、ランプが緑色で点滅します。

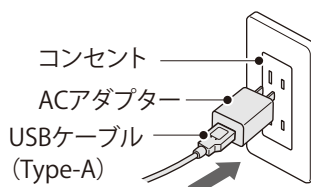

- 4 充電が完了したら、コンセントから AC アダプターを抜き、USB ケーブルを本体と AC アダプターの両方から外す

充電が完了すると、ランプが緑色で点灯します。

※充電中は本体を使用できません。






## 使いかた

### 1 本体布カバー・着脱カバーが破れていないか確認する

破れた状態で使用すると感電やけがのおそれがあります。  
どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

### 2 本体を使用部位に当て、ベルトを身体に回し、前バックルを留める

※ 施療部に髪がかかる場合は、まとめるなどして、もみ玉部に髪がなるべく接触しないように注意して下さい。  
※ 本体を落としてけがをしないように注意して下さい。  
※ 肩に使用する場合は**操作部が左側**に来るようにしてください。

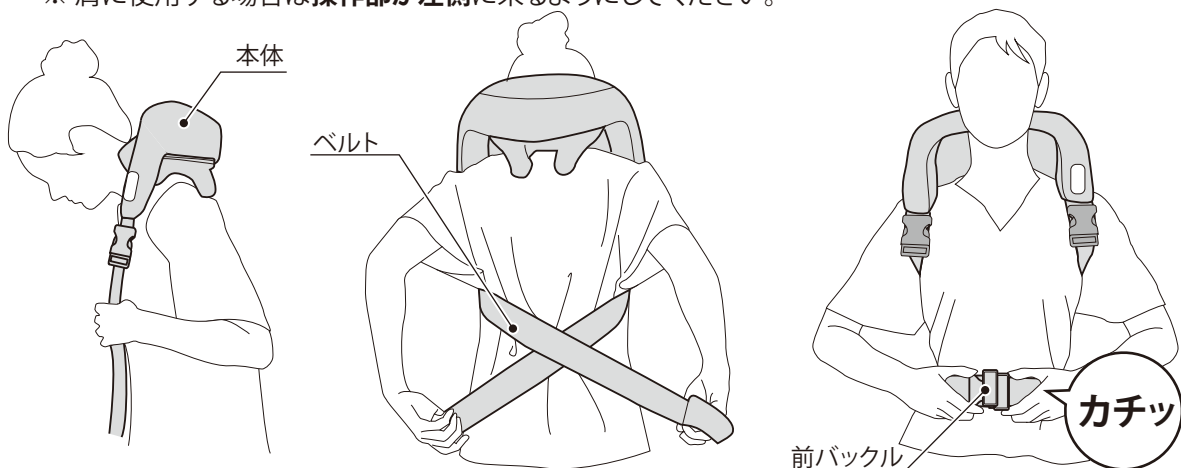


本体を肩にかけ、ベルトを後ろ(背中)で交差させます。

交差させた後、ベルトを前に持ってきて前バックルで固定します。

## 前バックルの長さ調節／オス側


### ベルトを短くする

- ①バックルをベルトに対して垂直にします。
- ②バックルを持ちながらベルトの端を引っ張ります。

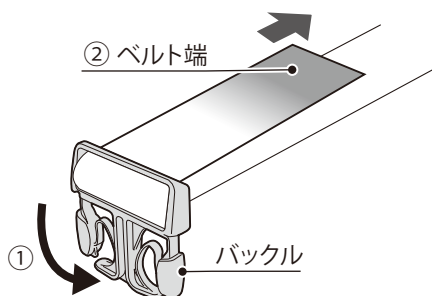

### ベルトを長くする


- ①バックルをベルトに対して垂直にします。
- ②バックルを持ち、移動します。

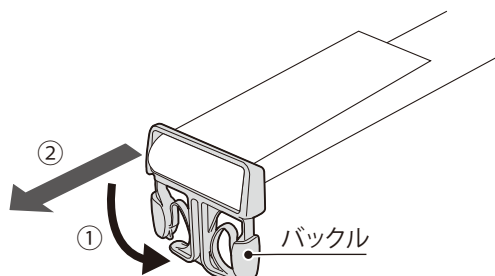


## 前バックルの長さ調節／メス側

### ベルトを短くする

①アジャスターからベルトを図のように外します。

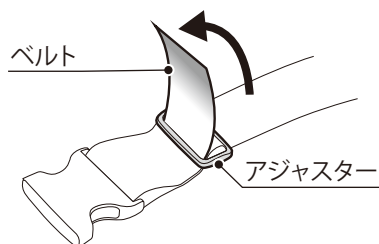


②ベルトの端を引っ張ります。

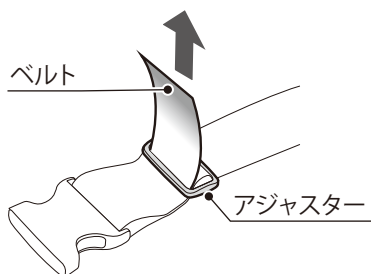


③①と逆の手順で、アジャスターにベルト通し、元に戻します。

### ベルトを長くする


①アジャスターからベルトを図のように外します。

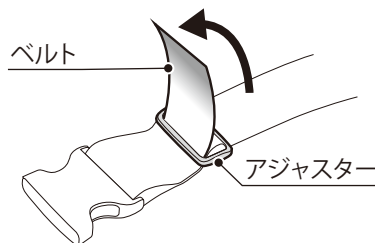

②図で色がついている部分のベルトを矢印のように引っ張ります。

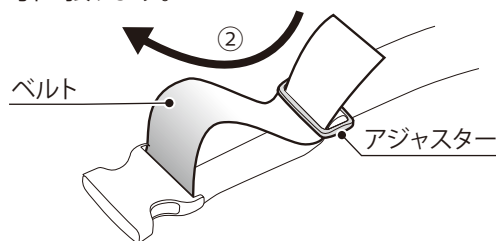




③アジャスターやバックルの位置を調節しながら、図で色がついているベルトをアジャスターを持ちながら、矢印のように引っ張ります。

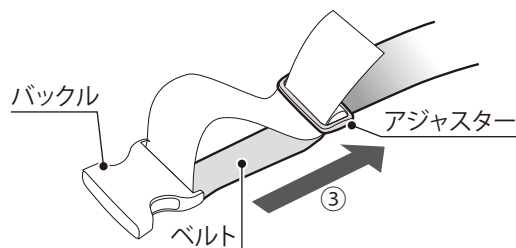

④①と逆の手順で、アジャスターにベルト通し、元に戻します。

### ベルトを外す

本体バックルを下図を参考に取り外すと、本体からベルトを取り外すことができます。

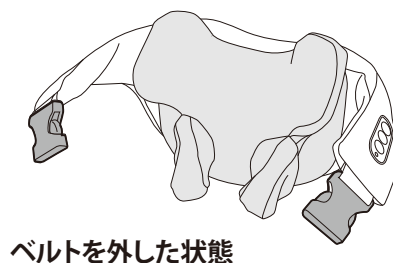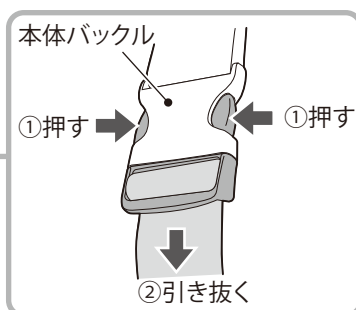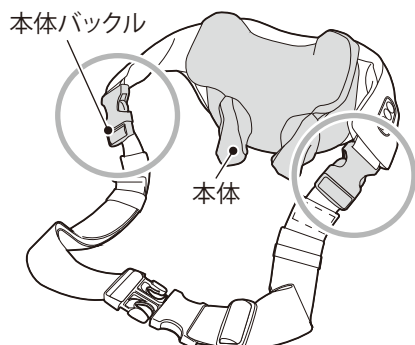

## 3 スタート / ストップボタンを押して、マッサージを開始する

### 自動コース

「スタート / ストップ」ボタンを押すと、自動コースが開始します。  
もう一度押すと、すべての動作が停止します。

### 正転 / 逆転コース

自動コース動作中に「正転 / 逆転」ボタンを押すと、正転コースが開始します。  
もう一度押すと、逆転コースが開始します。

※約 15 分でコースが自動的に終了します。

## 4 ヒーターを使用する

「ヒーター」ボタンを押すと、ON になり、ランプが赤色に点灯します。  
もう一度押すと OFF になります。  
コースの終了とともに、ヒーターも OFF になります。

※温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。

※ヒーターのみの使用はできません。



**⚠ 注意** 熱や痛みに敏感でない人はヒーター機能を使用しない。  
低温やけどのおそれがあります。


### ● マッサージやヒーターを途中でやめる

スタート / ストップボタンを押してください。

※もみ玉が原点位置に戻ってから停止します。

### ● 身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合

スタート / ストップボタンを押してください。  
○部分の前バックルを外して本体を身体から離してください。

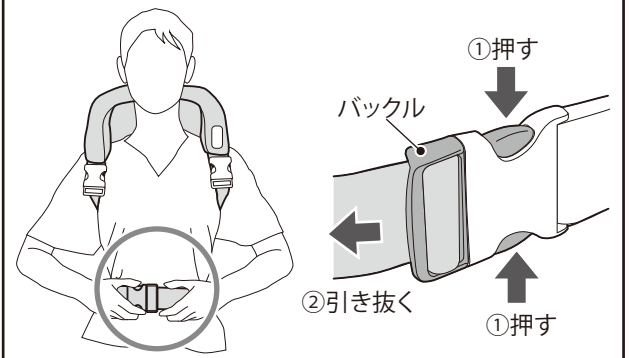

**⚠ 注意** 製品の使用時間は 1 回 15 分以内にする。  
また同一箇所への連続使用をさけ、一日の使用は 30 分以内をめどに使用する。  
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

# 使いかた

## 使用例


「腰」や「太もも」「ふくらはぎ」にも使用することが可能です。




**警告** 本体の上に寝た状態で使用しない。  
本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。



椅子やソファの背もたれにもたれかかった状態で、本体を背中や腰で使用しない。  
本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

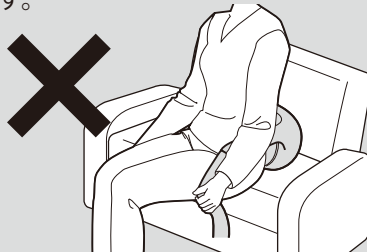

### 首・肩

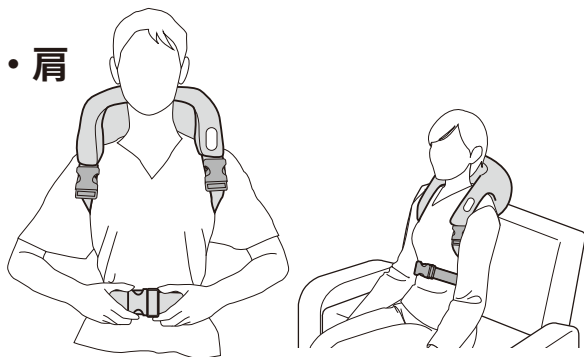

### 腰



### ふともも



### ふくらはぎ



## コースの特長

<b>スタート ストップ</b>	もみ上げ、もみ下げ動作を主に繰り返し、しっかりコリをほぐしながらマッサージします。
<b>正転 逆転</b>	一定の速度で 15 分間、機構部のもみ玉が「正転」動作します。
	一定の速度で 15 分間、機構部のもみ玉が「逆転」動作します。

## 着脱カバーの取り外し・取り付け

必ず着脱カバーを取り付けた状態で使用する。  
事故やけが、低温やけどの原因になります。



**警告**

必ず本体布カバーと着脱カバーが破れていないか確認する。どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、修理を依頼する。  
事故やけが、低温やけどの原因になります。

### 取り外し

1


#### USB ケーブルを本体から抜く

- 操作部に触れないようにしてください。  
急に動作する場合があります。

2

#### 着脱カバーを本体から取り外す

- 本体施療部についているファスナーを外し、  
着脱カバーを取り外します。

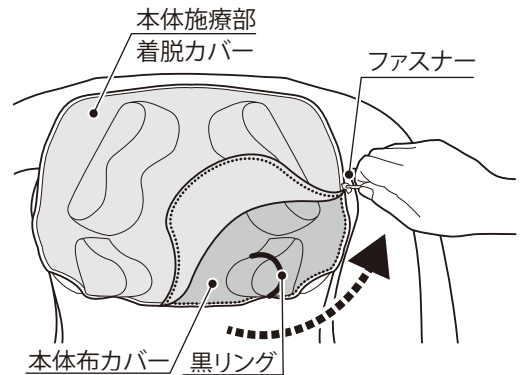

**注意**


下もみ玉の根元に黒いリングを取り付けています。  
このリングは本体布カバーのずれを防止しています。  
外れた場合は元の位置に取り付け直してください。

### 取り付け

1

#### 着脱カバーを本体に取り付ける

- 最後まで確実にファスナーを閉めてください。

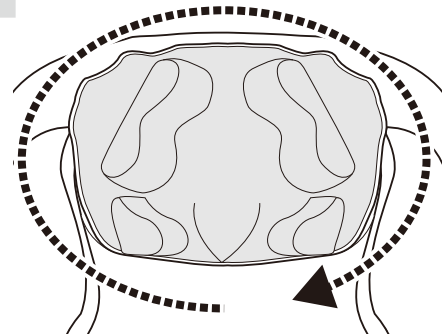

## お手入れについて

### 本体・操作部のお手入れ

※本体布カバーは取り外しできません。

次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。



**注意** お手入れをするときはスタート/ストップボタンを押して電源を切る。また充電している場合は、充電をやめ、必ず USB ケーブルを本体から抜く。またぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししない。

- ①かるい汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ②汚れのひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。  
ただし、本体内部に水などが入らないようにご注意ください。
- ③自然乾燥でよく乾かしてください。

### 着脱カバーのお手入れ

着脱カバーは取り外すことができますので、着脱カバーが汚れたら取り外して洗濯してください。

※着脱カバーは色落ちする可能性がありますので、他のものと分けて洗濯してください。

- ①本体から着脱カバーを取り外します。
- ②洗濯ネットに入れ、中性洗剤を入れた洗濯機で洗ってください。
- ③風通しの良い日陰に干し、自然乾燥で乾かしてください。

## 使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本体に布カバーをかけてホコリなどがつかないようにしてください。

USB ケーブルはねじれをほどいて保管してください。

また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

子供の手の届くところには保管しないでください。



## 製品を廃棄するとき

製品を廃棄する場合は、必ずお住いの市町村の定めた条例に従って、廃棄してください。



**警告**


下記の手順はリチウムイオン電池を安全に処分するための手順です。修理・電池交換の手順ではありません。

### 1 本書に従って、製品の電池残量が無くなるまで使用する


### 2 スタート/ストップボタンを押して動作を停止し、本体布カバー・着脱カバーの機構部分をはさみで切る

※作業中に操作部を触らないように注意してください。


リチウムイオン電池に電池残量がある場合、突然動き出すおそれがあります。

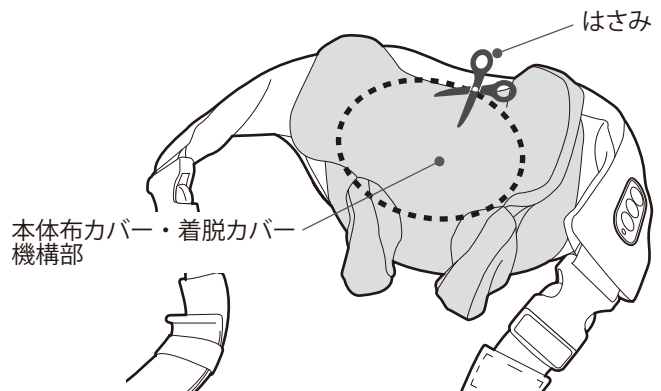

### 3 内部の機構部品を固定している面ファスナーを外す

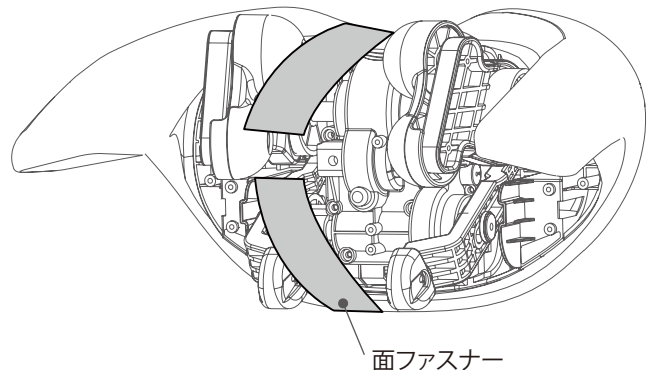

### 4 内部の機構部品を裏返し、中央にある電池ケースの蓋のネジを取り外す(ネジ4本)

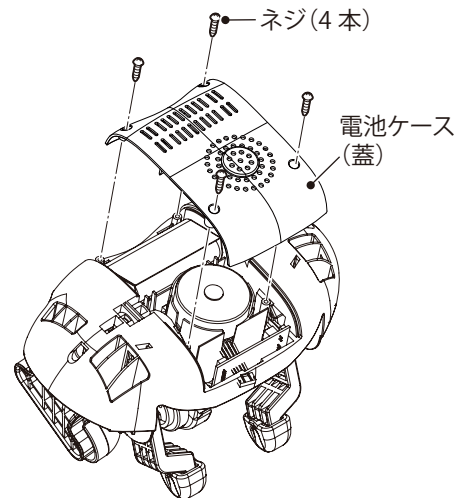


### 5 リチウムイオン電池を取り出し、3本のリード線を1本ずつ切る

※ニッパーを使用してください。

※リード線は、必ず1本ずつ切ってください。


複数本を同時に切断するとショートし、大変危険です。

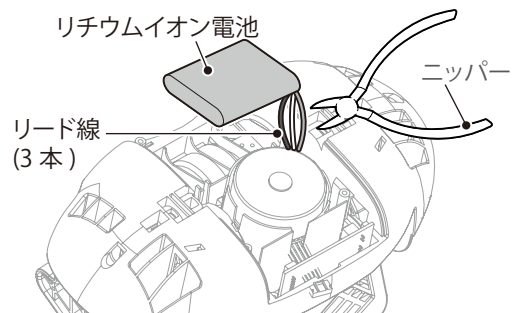

### 6 リチウムイオン電池のリード線にテープを貼って絶縁する

※切ったリード線は接触しないようにしてください。

(ショートする危険性があります。)

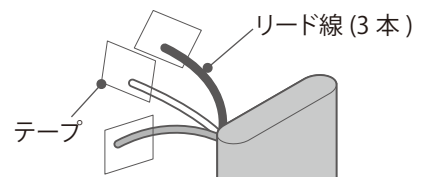

警告

- ・リチウムイオン電池に釘を刺す、衝撃を与える、分解、修理、改造は絶対にしない。
- ・火に入れたり、加熱しない。
- ・炎天下や高温になる場所、ストーブなどの火の近くに放置しない。

### リサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池は貴重な資源です。

不要になったバッテリーの廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。

お住いの自治体の規則に従って廃棄してください。



## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度下記内容をお確かめください。それでも異常がある場合は、勝手に修理などせず、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	対処方法
電源を入れても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電中である。</li> <li>●充電不足である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電中はボタンを押しても動作しません。充電を中止してから使用してください。</li> <li>●充電してください。</li> </ul>
動作中に停止した	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイマーがはたらき、動作が止まっている。</li> <li>●大きな負荷がかかったり、本体内部が高温になって安全装置が作動している。</li> <li>●操作部のランプが赤と緑に点滅し、その後動作が停止した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●連続使用を避け、30分以上時間をあけてから、もう一度操作してください。</li> <li>●安全装置が作動し、モーターが止まる場合があります。必ず停止ボタンを押して電源を切り、30分以上時間をあけてから、もう一度操作してください。</li> <li>●電池残量が少なくなっています。動作停止確認後、充電してください。(P7参照)</li> </ul>
温かくない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ヒーター」がOFFになっている。</li> <li>●お使いになる環境や使用時間によってはヒーターが最高温度に達しないことがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ヒーター」をONにしてください。(P10 参照)</li> </ul>
充電できない 充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●周囲温度が極端に低い／高い。</li> <li>●リチウムイオン電池の寿命である。</li> <li>●ACアダプターの仕様が合っていない。</li> <li>●USBケーブルの規格が合っていない。</li> <li>●連続使用してリチウムイオン電池の温度が上昇している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●周囲温度10～35℃の環境下で充電してください。</li> <li>●充電しても極端に使用時間が短くなった場合はリチウムイオン電池の寿命です。(電池寿命は使用・保管状況で変わります。また充電可能回数の目安は約300回です)</li> <li>●定格出力DC5V/2.0-2.5Aを推奨しています。また3.0Aを超えるものは使用しないでください。</li> <li>※ ACアダプターは付属していません。</li> <li>●付属のUSBケーブルを使用してください。ご購入後、1年以上経過しての故障や紛失した場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせ頂き、ご購入していただけます。</li> <li>●安全装置が働き操作部ランプが赤点滅し、充電できない場合がありますが、異常ではありません。充電池の温度が下がれば充電できますので、5時間以上(使用環境により異なります)放置し、充電を再開してください。</li> </ul>
動作音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●構造上ある程度の動作音が発生します。機能などに影響はありません。</li> </ul>	

# 仕様

販売名／型番	ハンズフリーマッサージャー e angle / ANGV-MSHF15-A
医療機器認証番号	306AABZX00045000
医療機器の種類	管理医療機器
類別	機械器具 77 バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 [JMDN コード 34662000]
使用電源	DC5.0V 1.5A/7.5W
使用電池	DC7.4V(リチウムイオン電池 2200mAh)
充電時間	約 6 時間
満充電時の使用可能時間	～ 約 2 時間(使用回数、使用環境によって異なります)
定格時間	15 分
消費電力	23W(ヒーター 8W を含む)
外形寸法(mm)	約 幅 270× 奥行 235× 高さ 185mm
ベルト寸法(mm)	約 幅 50× 長さ 1300mm(片側 650mm)
使用可能ウエストサイズ	100 c m以下
質量	約 1.7 kg
専用 USB ケーブル	USB タイプ A - タイプ C 約 600mm
材質	本体構造部材：ABS 樹脂 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル / ポリウレタン
製造国	中華人民共和国
医療機器製造販売元	株式会社 惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492
医療機器製造販売業許可番号	25B2X10001

※この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

またアフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

No product service is available outside of Japan.

## PSE マーク／2 重絶縁マークのある

### 定格出力 DC5V/2.0-2.5A 出力の AC アダプター推奨

#### 対応 AC アダプター

※急速充電ができる PD (Power Delivery) や QC (Quick Charge)

対応の AC アダプターは使用しないでください。

※AC アダプターは付属していません。

#### シンボルマーク



「電気用品安全法」を満たしていることを示す



2 重絶縁表示

## ■製品に表示されているシンボルについて

	直流マーク
	電気機器の感電に対する保護の分類。 感電に対する保護を安全特定低電圧 (SELV) の電源に依存し、安全特定低電圧 (SELV) より高い電圧が発生しない機器。
	リチウムイオン電池のリサイクルマーク。

## アフターサービス

### 修理を依頼されるときは

- 「故障かな？と思ったら」(P16)をご確認ください。  
それでも異常があるときは使用を中止し、充電中の場合は USB ケーブルを抜いてください。
- 製品と保証書・お買い上げレシートを準備し、  
家電の 119 番、または販売店にお問い合わせください。

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。  
技術料：診断・故障個所の修理および部品交換・調整・  
修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

### 保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

#### 《保証期間中》

保証書の内容に従って修理いたします。

#### 《保証期間が過ぎている場合》

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

※場合によっては修理できない場合もございます。

### 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品を製造打ち切り後、6 年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内

### お取り扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談ください

※お買い上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は各窓口へお問い合わせください

#### お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。  
ご質問の内容によりましては、適切な回答のためにエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。  
その他、ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

### ご相談窓口 ～製品に関するお問い合わせ～

#### ■品質保証部（製造販売元：株式会社 惣田製作所）

無料

0800-600-5575（無料）

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00（土日祝・年末年始除く）

〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2024.10 時点）

### 修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

#### ■家電の119番



0570-06-0119（有料）

受付時間：月曜日～日曜日 9：00～19：00（年中無休）

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2024.10 時点）

### 愛情点検

長年ご使用の「ハンズフリーマッサージャー」の点検を！



こんな症状はありませんか

- ・USB ケーブルが異常に熱い
- ・ケーブルに深い傷や変形がある
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・ボタンを押しても時々運転しないことがある
- ・その他異常や故障がある

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。